

# WERKINSTRUCTIE AED



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	December 2023
Auteur	VRGZ

## ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van de AED (Corpuls Benelux UAT0066).

Deze werkinstructie is geen vervanger van de gebruiksinstructie zoals afgegeven door de fabrikanten/leveranciers van dit gereedschap. Voor de volledige gebruiksinstructie zie de complete gebruiksinstructie van de fabrikant/leverancier.

## TOEPASSING en veiligheid

De AED is een hulpmiddel ontwikkelt om het niet normaal functioneren van het hardritme te resetten (stil te leggen). Bij een normaal hartslag ritme zal de AED geen schok adviseren. Bij twijfel over een hartritme storing altijd de AED aansluiten en starten met reanimeren.

Denk bij het gebruik van een AED aan je eigen veiligheid! Voorkom besmetting met lichaamsvochten (bloed, braaksel, urine, speeksel e.d.)



CO melder



handschoen



bril



handenwassen

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht 1.8 kg hoogte 28.5 cm lengte 22 cm breedte 10.5 cm

## GEBRUIK van de AED

1. Statusindicatie
2. Aan / Uit knop
3. Keuzeknoppen
4. Schoktoets
5. Display



**1:** Houd de AAN / UIT knop 2 seconden ingedrukt om de AED aan te zetten. Met deze knop zet je de AED na gebruik ook weer uit. Hiervoor houd je de AAN /UIT knop ook weer 2 seconden ingedrukt.

**2:** Controleer of de stekker van de defibrillatie elektroden is aangesloten op de AED.

**3:** Plak de twee pads op de patiënt. De pads worden van rechtsboven naar linksonder op de patiënt geplakt. Volg hiervoor de aanwijzingen op de verpakking van de pads. Verwijder kleding en scheer eventueel aanwezig borsthaar weg.

**4:** Volg de aanwijzingen van de AED (stemgeluid via speaker). Verbreek al het contact met de patiënt tijdens analyse en toedienen schok.

**5:** Na een inzet met de AED heeft het apparaat gegevens verzameld. Deze moeten na iedere inzet bij terugkomst op de post verzonden worden. Dit doe je door 7 – 12 seconden op de AAN / UIT knop te drukken. De AED voert nu een zelftest uit en verstuurt alle data.

**6:** Verwijder alle kabels uit de AED. Reinig en/of desinfecteer de AED totdat al het zichtbare vuil is verwijderd. Gebruik alleen schone doeken of zachte borstels om vuil of vlekken te verwijderen.

## SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Zijn de pads gebruikt? Dan verstrekt de ambulance op locatie nieuwe pads. Mocht dit vergeten worden, organiseer dan nieuwe pads via: [Materiaal@vrgz.nl](mailto:Materiaal@vrgz.nl)



Instructievideo  
Reanimatie volwassene  
(Nederlandse  
Reanimatie Raad)

Beschadigingen aan de AED, bied deze dan aan bij het service centrum.